

NEDERLANDS

1. Algemene informatie

Geachte klant,

Deze gebruikershandleiding bevat een beschrijving van dit medische hulpmiddel en belangrijke aanwijzingen voor een correct en veilig gebruik. Het is van belang deze handleiding zorgvuldig door te lezen alvorens de rollator te gebruiken. Het is vooral van belang de veiligheidsvoorschriften te lezen en deze in acht te nemen.

REHASENSE is continue bezig met het verder ontwikkelen van haar producten en behoudt zich het recht voor om bepaalde specificaties en functies te wijzigen zonder daar over te corresponderen.

Indien u vragen heeft, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer, of direct tot **REHASENSE**. De contactinformatie is op de laatste pagina van deze handleiding weergegeven.

2. Beoogd gebruik, indicaties & contra indicaties

Doel: De rollator is ontwikkeld om als loophulpmiddel te dienen voor personen die problemen hebben met lopen, staan of niet lang bezig kunnen zijn zonder even te zitten. Dankzij de rollator kunnen zij staan, lopen en even rusten zodra dat nodig is, zodat zij in feite de meeste dagelijkse routines die zij al kennen, door kunnen zetten zonder van hulp afhankelijk te zijn. Elk ander gebruik van de rollator is niet toegestaan.

Indicatie: De rollator is speciaal geschikt voor personen die, vanwege diverse mogelijke gezondheidsproblemen hulp nodig zijn bij het lopen. Daarnaast is de rollator speciaal ontwikkeld voor personen met weinig kracht in de armen en/of verminderde functie van de polsen door bijvoorbeeld artritis maar die hun onderarmen nog kunnen gebruiken om te steunen.

Contra-indicatie: De rollator moet niet gebruikt worden door personen die ernstige stabiliteitsproblemen hebben bij het staan en/of onvoldoende spierkracht hebben om te staan of te lopen, ook wanneer dat met een rollator wel lijkt te kunnen. Het gebruik en de noodzaak hiervan moet altijd vastgesteld worden door een medisch geschoold persoon als een fysiotherapeut of ergotherapeut.

3. Levering & algemene productomschrijving

De rollators worden in dozen aangeleverd, ingeklapt om ruimte te besparen en waardoor de doos makkelijker te hanteren is.

De inhoud van een doos:

- ✓ 1 complete ingeklapte rollator
- ✓ 1 klein nettasje om tussen de duwhandvatten te hangen
- ✓ 1 gebruikershandleiding

De **Navigator** is een vierwielige rollator met hoge onderarmschalen. Deze zeer stabiele en comfortabele onderarmsteunen zijn in hoogte verstelbaar, zodat gebruikers ze precies aan hun lengte aan kunnen passen. Optioneel kan hij worden uitgerust met draaibare onderarmsteunen. De **Navigator** is gemaakt van aluminium en heeft een kruisframe, zodat hij eenvoudig kan worden gevouwen en gemakkelijk kan worden opgeborgen of vervoerd. Het is uitgerust met een netzitje waarop de gebruiker plaats kan nemen om uit te rusten en voorzien van een boodschappentas voor het vervoer van kleine artikelen.

4 Veiligheidsvoorschriften

Vergewis u ervan dat deze handleiding door alle personen die gebruik maken van deze rollator doorgelezen is. De producent draagt geen verantwoordelijkheid voor schade en/of verwondingen opgedaan door het niet juist opvolgen van de voorschriften.



Beperking in het gebruik

- De rollator mag niet hoger belast worden dan met 150 kg.
- In de boodschappentas mag maximaal 5 kg in opgeslagen worden.
- De rollator is gemaakt voor gebruik voor enkel BINNENSHUIS op een vlakke ondergrond.
- De rollator is niet geschikt om al zittende op verreden te worden.
- De rollator moet op de handrem gezet worden **VOORDAT** men er op gaan zitten.




Ongelukken vermijden

- Gebruik de rollator enkel waarvoor hij bedoeld is
- Gebruik de rollator enkel in goede technische staat.
- Maak geen technische aanpassingen aan de constructie van de rollator, tenzij U hiervoor een verklaring van de producent heeft, dat dit toegestaan is.
- Bij het aanpassen van de verschillende instellingen die mogelijk zijn op deze rollator dient men er goed op te letten dat geen vingers of andere delen van het lichaam bekneld raken tussen de bewegende delen.
- Het apparaat mag alleen BINNENSHUIS worden gebruikt op een stabiele ondergrond.
- Tijdens gebruik van de rollator, dienen ALLE 4 de wielen te allen tijde in contact te zijn met de vloer. Dit stelt zeker dat men de rollator op de juiste wijze gebruikt waardoor ongelukken worden voorkomen.
- Indien men de rollator in stilstaande positie gebruikt, dient hij op de handrem te staan.

 <p>Mind Your Fingers</p>	<p>Vingers of andere delen van het lichaam van de gebruiker of van een assistent kunnen bekneld raken wanneer het apparaat ingeklapt wordt of wanneer de beweegbare delen anders ingesteld worden. Wees uitermate voorzichtig bij het instellen van het apparaat. Let vooraf op de ruimte die overblijft tussen te bewegende delen om te voorkomen dat Uw vingers of andere delen van het lichaam bekneld raken.</p>
--	--

5 Product details

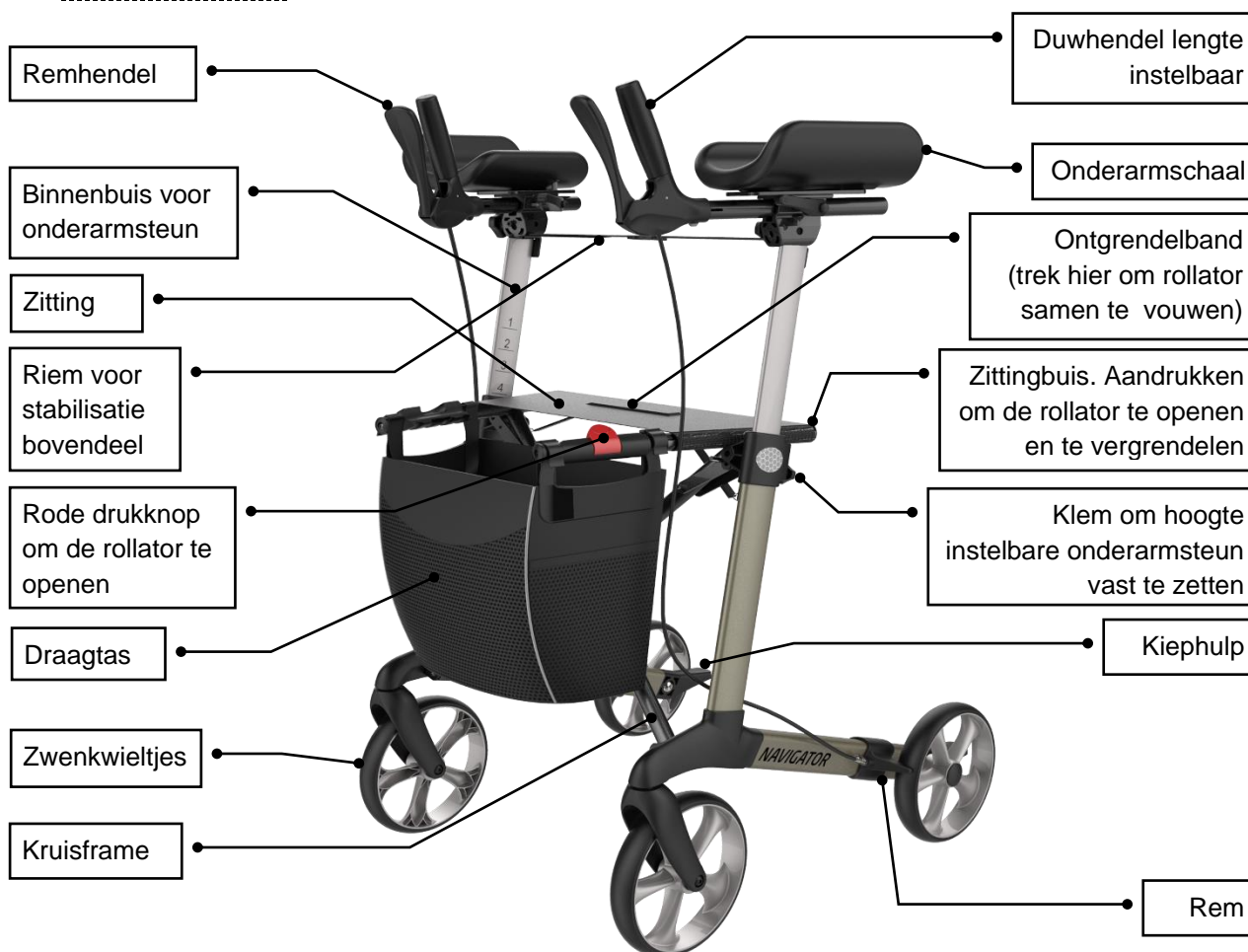

6 Gebruik

Met behulp van de bovenstaande afbeelding kan het apparaat worden voorbereid voor gebruik. We raden u echter aan de stap voor stap onderstaande instructies te volgen.

Eerste controle

- Neem eerst de rollator uit de doos en controleer a.d.h.v. de voorgaande afbeelding dat er niets mist.
- Als u meteen al merkt dat er iets mist of beschadigd is, ga dan niet door met uitpakken, maar neem direct contact op met uw dealer.

Uitklappen van de rollator

- Druk op de rode knop welke de zitting buizen bij elkaar houdt.
- Trek de beide armsteunen iets uit elkaar en druk daarna tegelijkertijd de uiteinden van de zitting naar beneden totdat U een duidelijke klik hoort. Hierna is het frame in uitgeklapte stand vergrendeld.
- Pak daarna de beide buizen van de zitting nog een keer en probeer ze naar boven te trekken. Als dit niet lukt is het frame op de juiste wijze vergrendeld in openstaande positie zoals in voorgaande afbeelding.
- Klik de beide riemen tussen de onderarmschalen aan elkaar. De riem moet met het klittenband zodanig op lengte ingesteld worden opdat er een lichte trekkraft tussen de beide onderarmschalen ontstaat.





- *Verzekeer u er altijd van dat na het uitklappen van de rollator, de zitting goed vergrendeld is op het frame, zodat het geheel niet kan bewegen als daar kracht op uitgeoefend wordt.*
- *Verzekeer u er altijd van dat de draaiknoppen van de hoogteverstelling goed aangedraaid zijn zodat het binnenprofiel van de onderarmsteunen niet onverwachts in kan schuiven.*
- *Controleer dat de beide armsteunen zich op dezelfde hoogte bevinden en vast bovenop het binnenprofiel gemonteerd zijn. Het is niet toegestaan een defecte rollator te gebruiken.*
- *Verzekeer u er altijd van dat na alles vastgezet te hebben, er niets meer bewegen kan.*
- *Test altijd voor het gebruik van accessoires dat deze correct aangebracht zijn en geen speling hebben t.o.v. de rollator.*
- *Het niet opvolgen van bovenstaande veiligheidsinstructies kan resulteren in persoonlijke verwondingen*

Inklappen van de rollator

- Ontkoppel eerst de riemen van de onderarmschalen.
- Trek de handgreep van de zitting naar boven.
- Vouw de rollator in totdat de rode drukknop in het slot klikt.



Hoogte instelling van de handgrepen

- Altijd eerst de beide riemen ontkoppelen
- Draai de vastzetknop los
- Verstel de onderarmsteunen tot de juiste hoogte
- Draai de knop weer aan
- Koppel de riemen **(3)** voor volledige stabiliteit van de armsteunen.



- *De beide onderarmschalen horen op dezelfde hoogte ingesteld te staan.*
- *Met correct afgestelde onderarmschalen staat de gebruiker volledig rechtop.*
- *Bevestig altijd eerst de beide riemen voordat er druk op de armschalen wordt uitgeoefend*
- *Het niet opvolgen van bovenstaande veiligheidsinstructies kan resulteren in persoonlijke verwondingen.*

Instellen van de lengte van de handgrepen.

- Ontkoppel eerst de riemen van de onderarmschalen.
- Draai de vastzethendel linksom los **(2)**.
- Stel de juiste lengte en hoek in zodanig dat de hendel prettig vast te pakken is.
- Zet de handgrepen weer vast door de hendel rechtsom vast te draaien.
- Koppel de riemen weer.

Instellen van de hoekverdraaiing van de onderarmschaal

- Ontkoppel de riem tussen de armsteunen.
- Draai de vastzetknop los (1).
- Verdraai de onderarmschaal tot gewenste positie die het meest comfortabel is.
- Er zijn 3 mogelijke instellingen: 0°, 22,5° en 45°.
- Draai de vastzetknop weer vast.
- Koppel de riemen.

Gebruik van de rem

- Om de rollator te stoppen of af te remmen dient men de remhendels in te knijpen.
- Om stil te blijven staan kan men eenvoudigweg de rem ingeknepen houden.
- De remkracht kan verder opgevoerd worden door de remhendels met meer kracht in te knijpen.
- Om verder te lopen kan men de rem weer loslaten, de rem wordt automatisch gelost.



- *Het nettasje kan enkel voor de posities 0 ° en 22,5 ° worden gebruikt.*



- *Bij stilstand altijd de rem ingeknepen houden.*
- *Altijd de rollator eerst op de handrem zetten alvorens er op te gaan zitten.*
- *Vooraf op een helling mag de rollator niet achtergelaten worden zonder dat hij op de handrem staat.*
- *Ga nooit te ver naar achteren zitten. Ga niet (deels) boven de boodschappentas zitten.*
- *Men mag nooit achterover leunen terwijl men op de rollator zit.*

Op de handrem zetten en hem er weer afhaken.

- Om hem op de handrem te zetten, beide remhendels naar voren duwen totdat u deze hoort klikken.
- Om hem weer van de handrem af te halen, beide hendels naar u toe trekken waardoor de handrem met een klik weer gelost wordt.



- *In stationaire positie dient de rollator ALTIJD op de handrem te staan.*

7. Reiniging

Algemeen:

Reinig de rollator regelmatig en houd hem schoon.

Klein los vuil en stof kan met een vochtige doek worden verwijderd..

Groter vastzittend vuil kan met een niet-corrosief wasmiddel en warm water worden verwijderd.

Gebruik geen harde schuurmiddelen of bleekmiddel. Dit kan schade of verkleuringen veroorzaken.


Droog de delen met een zachte doek.

Wielen:

Reinig de wielen met warm water en een zacht wasmiddel. Droog ze af met een schone doek.

8 Label voorbeeld

Het productlabel is op de binnenkant van een van de verticale buizen van het zij-frame bevestigd.

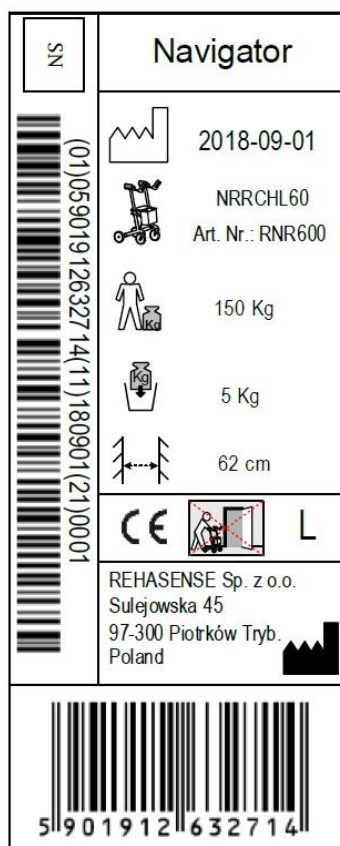

9 Technische gegevens

NAVIGATOR - Rollator met onderarmschalen			
Type	Met vaste onderarmschalen		Met draaibare onderarmschalen
Grootte	Large	Medium	Large
Maximale belasting	150 kg	150 kg	150 kg
Gewicht zonder boodschappentas	9,4 kg	9,2 kg	9,9 kg
Hoogte verstelbare onderarmschalen	90-115 cm	75-98 cm	90-114 cm
Draaibare onderarmschalen	No	No	22,5° of 45° binnenwaarts
Lengte	67 cm	67 cm	67 cm
Breedte	63 cm	63 cm	63 cm
Breedte gevouwen	28 cm	28 cm	28 cm
Zitting breedte	46 cm	46 cm	46 cm
Zitting hoogte	62 cm	55 cm	62 cm
Max. vulgewicht van de boodschappentas	5 kg	5 kg	5 kg
Remmen	2 x handremmen met vergrendeling		
Wielen (diameter x breedte)	200 x 35 mm	200 x 35 mm	200 x 35 mm

10. Transport

De Navigator is een eenvoudig in te klappen product en zeer geschikt om mee te nemen op transport. Indien u de rollator mee wenst te nemen bijvoorbeeld in de auto of in een taxi, raden wij u aan deze in ingeklapte toestand mee te nemen. Desnoods in een hiervoor bij uw dealer te verkrijgen transporttas.

De rollator dient altijd op veilige wijze te worden vervoerd, zodanig dat hij vast staat en er geen kans bestaat dat hij kan bewegen bij plotseling remmen van het vervoersmiddel waarin hij getransporteerd wordt.

11. Onderhoud

- Vergewis U er van dat elke deel van de rollator zich altijd in goede staat bevindt.
- Controleer regelmatig of alle schroeven nog goed vastzitten. Indien ze niet goed vast zitten dient U deze aan te draaien.
- Gebroken, beschadigde of versleten delen dienen direct te worden vervangen.

12. Hergebruik

De rollator is geschikt voor hergebruik. Alvorens deze aan een andere gebruiker wordt aangeboden dient hij aan een inspectie worden onderworpen door de vakhandel.

De volgende punten dienen te worden gecontroleerd:

- stabiliteit van het frame.
- aangedraaid zijn van bouten en moeren
- conditie van de kunststof delen
- toestand van wielen en kogellagers
- conditie en werking van de remmen

Wanneer een van de onderdelen beschadigd of kapot is dient deze te worden vervangen door een nieuwe. Het wordt aanbevolen om bij hergebruik de wielen te vervangen. Alle losse bouten en moeren moeten worden aangedraaid.

Voor het opnieuw in gebruik stellen moet het product grondig worden gereinigd.

LET OP! Het is verboden om de rollator te hergebruiken wanneer het frame verbogen of gebroken is.

Bij hergebruik dient er een gebruiksaanwijzing bij de rollator meegegeven te worden.

13. Afvoeren van het product

Het apparaat dient niet bij het normale huisvuil te worden gezet maar aan een recyclingstation worden aangeboden.

14. Garantie

De producent geeft 8 jaar garantie op productiefouten. De garantie is niet geldig wanneer de rollator niet volgens de gegeven voorschriften is gebruikt. Defecten door onjuist gebruik, ongelukken en normale slijtage zijn uitgesloten van garantie. Voor reparaties binnen de garantieperiode neemt U s.v.p. contact op met uw dealer